

Patienteninformation zur Wurzelkanalbehandlung




Besser weniger Röntgen

Muss so viel
Strahlenbelastung
sein, **um Ihre**
Wurzelkanalbehandlung
zum **Erfolg** zu führen?

→ Wann ist eine Wurzelkanalbehandlung notwendig?

Bei Ihnen ist eine Wurzelkanalbehandlung erforderlich, da es zu einer Schädigung des Nervengewebes gekommen ist. Eine Ursache können Bakterien (Karies) sein, die in den Nervraum eingedrungen sind, sich dort vermehren konnten und damit eine Entzündung hervorgehen haben.

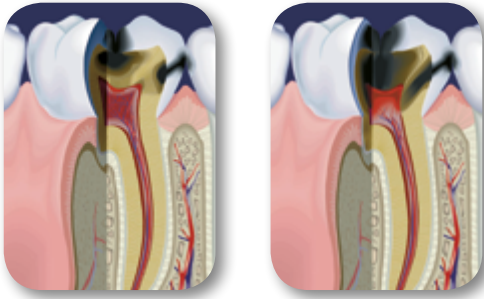

Karies im oberen Bereich

Karies mit Ausdehnung auf den Wurzelkanal

Dieses entzündete oder zerstörte Gewebe muss entfernt werden, die entstandenen Hohlräume gereinigt, erweitert, desinfiziert und anschließend mit einem speziellen Material gefüllt werden.

→ Was ist bei einer Wurzelkanalfüllung zu beachten?

Vor der eigentlichen Aufbereitung bzw. Füllung muss die Länge des Wurzelkanals exakt bestimmt werden. Denn nur eine Wurzelfüllung, die bis nahe an die Wurzelspitze reicht, kann den Zahn dauerhaft erhalten. Bei zu kurzer Füllung würden im Zahn noch Bakterien verbleiben, bei zu langer Füllung könnten Reizfaktoren im Knochen wirken und dort wiederum für eine Entzündung sorgen.



Exakte Wurzelfüllung



Überpresste Füllung

→ Probleme der bisherigen Messmethode

Vor einigen Jahren noch stellte die Röntgenmessaufnahme des Zahnes die einzige Möglichkeit dar, die Bestimmung der Kanallänge durchzuführen. Da das Röntgenbild aber nur eine 2-dimensionale Abbildung eines 3-dimensionalen Wurzelkanals zeigen kann, war die exakte Bestimmung der Kanallänge häufig nur eingeschränkt möglich. Die Folge war eine unzureichende Wurzelkanalbehandlung.



Die zuverlässige und einfache Messtechnik

→ Endometrie als fortschrittliche Messtechnik

Mit der Einführung der sog. Endometriegeräte steht eine Technik zur Verfügung, die eine genauere Bestimmung der Kanallänge ermöglicht als mit herkömmlichen Röntgenmessaufnahmen.

Mit dem RAYPEX®6 Längenmessgerät kann Ihr Zahnarzt die Lage der Wurzelspitze präzise über eine Widerstandsmessung ermitteln. Dies ist die Basis für eine erfolgreiche Wurzelkanalbehandlung.

Dank dieses modernen Messgerätes kann die Anzahl der nötigen Röntgenaufnahmen im Verlauf Ihrer Behandlung evtl. reduziert werden.



Endometrie mit RAYPEX®6

→ Ihre Vorteile

- Sie sind evtl. geringerer Strahlenbelastung ausgesetzt.
- Die exakte Bestimmung der Wurzelkanallänge ist eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg Ihrer Behandlung und damit für die langfristige Zahnerhaltung.
- So können Zahnersatz wie eine Brücke oder Implantat mit den damit verbundenen Folgekosten vermieden werden.

Vereinbarung einer Privatbehandlung

Name des Versicherten

Ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich als Patient der gesetzlichen Krankenversicherung das Recht habe, nach Vorlage der Krankenversicherungskarte nach den Bedingungen der gesetzlichen Krankenversicherung behandelt zu werden. Unabhängig davon wünsche ich ausdrücklich auf Grund eines privaten Behandlungsvertrages, gemäß der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) privat behandelt zu werden.

Abrechnung der endometrischen Längenbestimmung eines Wurzelkanals nach GOZ-Position 2400 (Stand 2012)*

Zahn	Anzahl	Gebühr	Faktor	Summe

* Die Leistung nach GOZ Nummer 2400 ist je Wurzelkanal höchstens zweimal pro Sitzung berechnungsfähig.

Ich weiß, dass eine Erstattung dieser Gebühr durch die Krankenkasse nicht gewährleistet ist.

Die umseitig beschriebene Behandlungsmethode mit Hilfe des Endometriegeräts RAYPEX®6 wird von den gesetzlichen Krankenkassen zur Zeit nicht bezuschusst.

Der Gesetzgeber verlangt daher vor der Längenbestimmung mit einem Endometriegerät eine Vereinbarung zwischen Ihnen und Ihrem Zahnarzt.

Eine entsprechende Vereinbarung finden Sie auf der linken Seite. Falls Sie dazu noch Fragen haben, so steht Ihnen Ihr Zahnarzt gerne zur Verfügung.

Praxisstempel

Ort, Datum

Unterschrift des Versicherten